



**КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ КГК-01 ПО ГИКС.942849.102 ТУ**  
**Код товара 570**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942849.102 РЭ**


**Назначение:** комплект предназначен для организации рабочего места по определению группы крови и резус-фактора в лечебно-профилактических учреждениях.

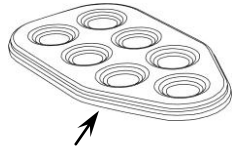

Планшет

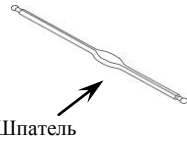

Шпатель

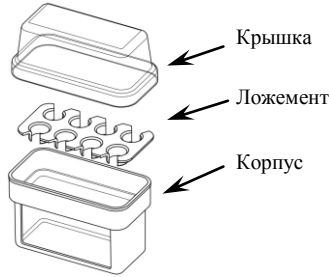

Крышка

Ложмент

Корпус

Штатив

**Комплект поставки:**

Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 - 1 шт. в том числе:

- планшет\* - не более 10 шт.;
- шпатель\* - не более 70 шт.;
- штатив\*\* - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

\* - количество определяется заказчиком

\*\* - входит в состав изделия по требованию заказчика

Потенциальными потребителями изделия является медицинский персонал в лечебно-профилактических учреждениях. Специальной подготовки медицинского персонала не требуется.

Наружные и внутренние поверхности комплекта устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306.

**Технические характеристики:**

Габаритные размеры составных частей комплекта, мм, не более:  
 планшета - 142x85x12 мм; штатива - 82x44x76 мм; шпателя - 102x4x9 мм  
 Масса комплекта не более 400 гр.

Календарный срок службы комплекта не менее 2 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния.

Критерием предельного состояния комплекта является наличие трещин, раковин, вздутий, расслоений.

**Меры безопасности**

К использованию комплекта КГК-01 приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

Все работы выполняйте с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

Оберегайте комплект от ударов, от контакта с открытым огнем.

Максимально допустимая температура воздействия на комплект должна быть не более (75<sup>±2</sup>) °С.

**Транспортирование и хранение**

Комплект в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования

- температура окружающей среды от плюс 50 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Хранение комплекта осуществляется в упаковке изготовителя:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С;
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

**Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание комплекта КГК-01 сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений составных частей изделия, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению надежности изделия, дефектные составные части или заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу у производителя изделия, или утилизируются.

**Утилизация**

Комплект отнесен к изделиям, подлежащим утилизации по правилам, предусмотренным в нормативных документах для медицинских отходов класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта требованиям технических условий ГИКС.942849.102 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 60 месяцев со дня упаковки.

Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 ГИКС.942849.102 ТУ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942849.102 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08846 от 24.04.2020г.



Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»  
 Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,  
 р.п. Елатьма, ул. Янина, 25  
 Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29  
 E-mail: lpu@elamed.com  
 lpu.elamed.com


ОМ №23.369.02  
 26.03.2020г.




**КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ КГК-01 ПО ГИКС.942849.102 ТУ**  
**Код товара 570**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942849.102 РЭ**


**Назначение:** комплект предназначен для организации рабочего места по определению группы крови и резус-фактора в лечебно-профилактических учреждениях.

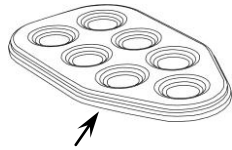

Планшет

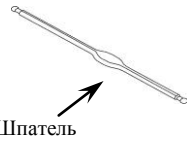

Шпатель

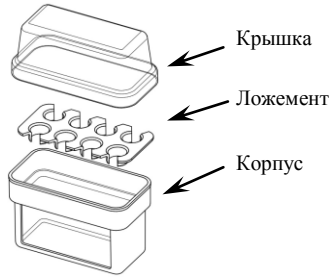

Крышка

Ложмент

Корпус

Штатив

**Комплект поставки:**

Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 - 1 шт. в том числе:

- планшет\* - не более 10 шт.;
- шпатель\* - не более 70 шт.;
- штатив\*\* - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

\* - количество определяется заказчиком

\*\* - входит в состав изделия по требованию заказчика

Потенциальными потребителями изделия является медицинский персонал в лечебно-профилактических учреждениях. Специальной подготовки медицинского персонала не требуется.

Наружные и внутренние поверхности комплекта устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306.

**Технические характеристики:**

Габаритные размеры составных частей комплекта, мм, не более:  
 планшета - 142x85x12 мм; штатива - 82x44x76 мм; шпателя - 102x4x9 мм  
 Масса комплекта не более 400 гр.

Календарный срок службы комплекта не менее 2 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния.

Критерием предельного состояния комплекта является наличие трещин, раковин, вздутий, расслоений.

**Меры безопасности**

К использованию комплекта КГК-01 приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

Все работы выполняйте с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

Оберегайте комплект от ударов, от контакта с открытым огнем.

Максимально допустимая температура воздействия на комплект должна быть не более (75<sup>±2</sup>) °С.

**Транспортирование и хранение**

Комплект в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования

- температура окружающей среды от плюс 50 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Хранение комплекта осуществляется в упаковке изготовителя:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С;
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

**Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание комплекта КГК-01 сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений составных частей изделия, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению надежности изделия, дефектные составные части или заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу у производителя изделия, или утилизируются.

**Утилизация**

Комплект отнесен к изделиям, подлежащим утилизации по правилам, предусмотренным в нормативных документах для медицинских отходов класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

**Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта требованиям технических условий ГИКС.942849.102 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 60 месяцев со дня упаковки.

Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 ГИКС.942849.102 ТУ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942849.102 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08846 от 24.04.2020г.



Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»  
 Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,  
 р.п. Елатьма, ул. Янина, 25  
 Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29  
 E-mail: lpu@elamed.com  
 lpu.elamed.com

ОМ №23.369.02  
 26.03.2020г.

