

# Медицинская мебель на основе металлокаркаса







Соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03, 2.1.3.2.630-10, 2.1.7.2790-10.

Входит в государственный реестр изделий медицинского назначения.

На все изделия имеются регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

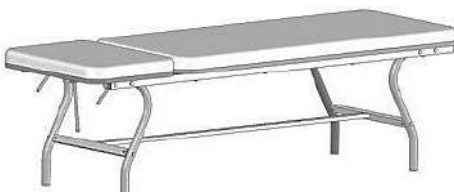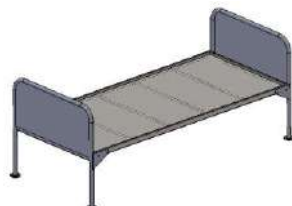

 <p><b>Кровать палатная передвижная КПП-01 «ЕЛАТ» (с ограждениями)</b> предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат. Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2085x840x925. Максимальная нагрузка: не более 170 кг. * боковые ограждения поставляются дополнительно</p>	<p><b>Столик - тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01- «ЕЛАТ» исп.8 (для сбора и транспортировки инструментов)</b></p> <p>предназначен для сбора инструментов, транспортировки и последующей обработки при помощи Ультразвуковой мойки УЗО 10-01 МЕДЭЛ в контейнере ЕДПО-10-01- «ЕЛАТ».</p> 
 <p><b>Кушетка стационарная КС-01 «ЕЛАТ»</b> Код товара 1442 предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах. Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 1860x600x550. Максимальная нагрузка: не более 150 кг.</p>	 <p><b>Кровать палатная односекционная стационарная КПОс-01-«ЕЛАТ»</b> предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат. Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2110x950x850. Максимальная нагрузка: не более 170 кг.</p>
<p><b>Модуль медицинский для сбора отходов МСО-01-«ЕЛАТ»</b> Код товара 189 предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки отходов внутри лечебного учреждения.</p> 	<p><b>Модуль медицинский для белья ММБ-01 «ЕЛАТ»</b> Код товара 2317 может быть использован как тележка для транспортировки чистого и сбора грязного белья.</p> 



## КРОВАТЬ ПАЛАТНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ КПП-01-«ЕЛАТ»

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Кровать палатная передвижная КПП-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем кровать) предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат. Для удобства использования имеется возможность регулировать с последующей фиксацией угла наклона спинной и ножной секций.

### **1. Основные параметры и размеры**

1.1. Масса не более 70 кг.

1.2. Габаритные размеры 2085x770x925 мм.

1.3. Угол между горизонтальной и спинной секцией регулируется в пределах от 0° до 70°.

1.4. Угол между горизонтальной и ножной секцией регулируется в пределах от 0° до 14°.

### **2. Характеристики**

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Предельная рабочая нагрузка 170 кг.

2.3. При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ15150 (от +10 °С до +35 °С).

### **3. Комплектность и инструкция по сборке**

3.1. Комплектность и инструкция по сборке кровати даны в приложении.

### **4. Транспортирование и хранение**

4.1. Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.2. Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

### **5. Дезинфекция**

5.1. Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ25644 и 1% раствора хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.

*Примечание: Допускается использование при дезинфекции кровати растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.*

### **6. Правила эксплуатации**

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения кровати или перевозки её в упаковке при температуре +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Производите сборку кровати согласно приложения.

6.1.3. После сборки кровати проверьте возможность подъёма и фиксации спинной и ножной секций.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации кровати

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода изделия из строя не допускается:

- нагружать рабочую поверхность выше норм, установленных в п. 2.2;

- скапливания жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время дезинфекции.

### **7. Гарантия изготовителя**

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

### **8. Свидетельство о приемке**

Кровать передвижная КПП-01-«ЕЛАТ» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.103ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ изделия \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

*Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11992 от 13.10.2011г.*

*Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ46.Д73190 от 14.09.2016г.*

**По вопросам качества изделия можно обратиться по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии – 8 800 200 01 13**