


# Медицинская мебель на основе металлокаркаса

Соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03, 2.1.3.2.630-10, 2.1.7.2790-10.

Входит в государственный реестр изделий медицинского назначения.

На все изделия имеются регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

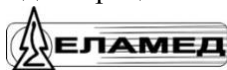

**Кровать палатная передвижная  
КПП-01 «ЕЛАТ»**

предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат.

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2085x770x925.  
Максимальная нагрузка: не более 170 кг



**Кровать палатная передвижная  
КПП-01 «ЕЛАТ» (с ограждениями)**

предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат.

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2085x840x925.  
Максимальная нагрузка: не более 170 кг.

\* боковые ограждения поставляются дополнительно




**Кушетка стационарная КС-01 «ЕЛАТ»**

Код товара 1442

предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах.

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 1860x600x550.  
Максимальная нагрузка: не более 150 кг.

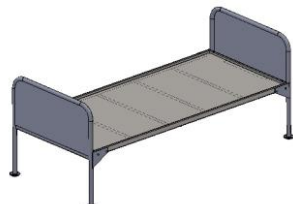

**Кровать палатная односекционная  
стационарная КПОС-01-«ЕЛАТ»**

предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат.

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2110x950x850.  
Максимальная нагрузка: не более 170 кг.

**Модуль медицинский для белья  
ММБ-01 «ЕЛАТ»**

Код товара 2317



может быть использован как тележка для транспортировки чистого и сбора грязного белья.



**Модуль медицинский  
для сбора отходов  
МСО-01-«ЕЛАТ»**

Код товара 189

предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки отходов внутри лечебного учреждения.

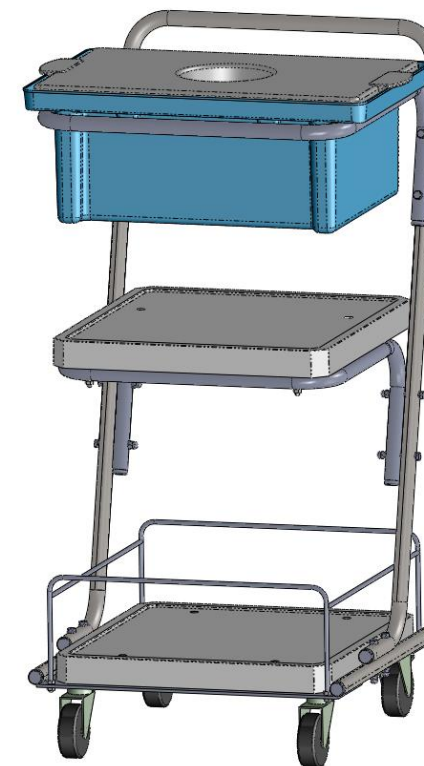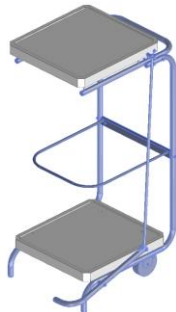

**СТОЛИК-ТЕЛЕЖКА  
МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ  
МАЛЫЙ ЯРУСНЫЙ  
СТМПм-01-«ЕЛАТ» (исп.8)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ» (исп.8) (далее столик-тележка) предназначен для использования во всех отделениях и кабинетах ЛПУ (операционные, процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты; больничные палаты, приемные покои, сестринские посты, лаборатории, аптеки и т.д.) независимо от их специализации: больницы, диспансеры, родильные дома, поликлиники (в том числе стоматологические), консультации, диагностические центры и т.д.

### **1. Основные параметры и размеры**

- 1.1. Масса 17,5 кг.
- 1.2. Габаритные размеры 525x495x965 мм.

### **2. Характеристики**

- 2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.
- 2.2. Номинальные нагрузочные характеристики столика-тележки:  
- на полку пластиковую 15 кг.
- 2.3. При эксплуатации столик-тележка устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ15150 (от +10 °С до +35 °С).

### **3. Комплектность**

- 3.1. Комплектность указана в приложении.

### **4. Транспортирование и хранение**

- 4.1. Столик-тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
- 4.2. Столик-тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).
- 4.3. Условия хранения столика-тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

### **5. Дезинфекция**

- 5.1. Поверхности столика-тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ25644 и 1% раствора хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.

*Примечание: Разрешается использование при дезинфекции наружных поверхностей столика-тележки и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.*

- 5.2. Наружные поверхности стоек, полки и ёмкость-контейнер ЕДПО 10-01 протирают дважды ветошью, смоченной в растворе. Время между протирающими не менее 10 мин.

### **6. Правила эксплуатации**

- 6.1. Подготовка к работе:
  - 6.1.1. После хранения столика-тележки или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 30 мин.

**ВНИМАНИЕ!** Для введения в эксплуатацию столика-тележки, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно с инструкцией по сборке.

### **6.2. Ограничения в процессе эксплуатации:**

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода столика-тележки из строя не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- подвергать поверхности воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.2.2. Оберегайте столик-тележку от ударов, от контакта с открытым огнём.

### **7. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание столика-тележки сводится к профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений, удаления загрязнений. В случае обнаружения дефекта в корпусе и верхней крышке ёмкости-контейнера ЕДПО-10-01, приводящих к утечке раствора из корпуса, снижению защиты обслуживающего персонала от испарений из ёмкости, ёмкость-контейнер считать бракованным и он подлежит утилизации.

### **8. Утилизация**

После окончания эксплуатации столик-тележка подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

### **9. Гарантия изготовителя**

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

### **10. Свидетельство о приемке**

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ» (исп.8) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.102 ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ изделия \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

**Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ04.Д00378 от 21.02.2017г.**

**Регистрационное удостоверение № ФСП 2008/02298 от 19.03.2008г.**

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии **8-800 200 0113**