



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29


E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com



Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 21.12.2017 г.

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800 200 0113

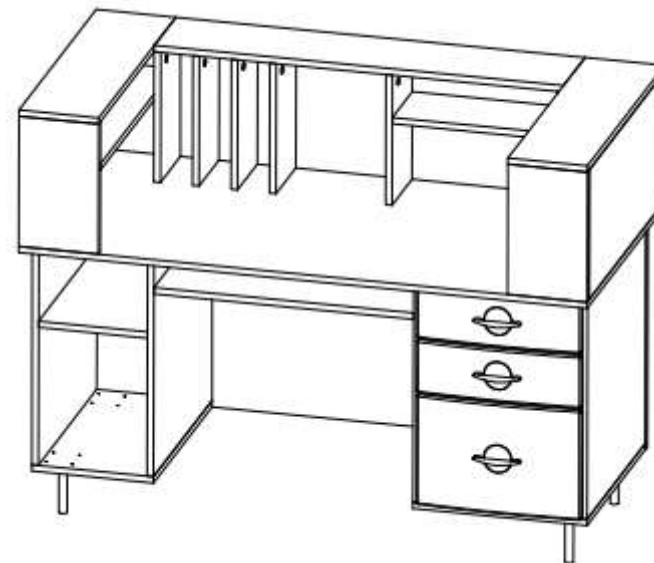

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НМП-01-«ЕЛАТ» по ГИКС.942810.101 ТУ

**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
СМС-01-«ЕЛАТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол медицинский для медицинской сестры СМС-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем стол), предназначен для использования в процедурных и смотровых кабинетах, для организации рабочих мест медицинского обслуживающего персонала.

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия 66,1±6,6 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 1400x700x1060 мм.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики стола при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу - не более 25 кг;

- на полку - не более 25 кг;

- на дно ящика - не более 10 кг.

2.3. При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

3. Комплектность и инструкция по сборке

3.1. Комплектность и инструкция по сборке стола даны в приложении.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-46-89-387-16-89.

Примечание:

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей стола и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

2. Не допускается скапливание жидкости на поверхности полок, в том числе и во время дезинфекции.

5.2. Наружные поверхности стенок, ящиков и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию стола, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки стола проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов относительно стенок стола;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации стола:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скапливания жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений внешних и внутренних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекции внешних и внутренних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (при необходимости).

9. Ремонт

9.1. Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность стола.

10. Утилизация

10.1. Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологических безопасных отходов, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Стол медицинский для медицинской сестры СМС-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 1734

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____